

CBCII

Blood Conservation System

CBCII 術後回収式 自己血輸血装置

- ・完全閉回路式
- ・バキュームポンプ内蔵



安全性と コストパフォーマンス

現代医療を表現するこの2つのKey WordがCBCIIの開発コンセプトです。
“術後自己血輸血”の新しい合い言葉。CBCIIが新しい世界を切り開きます。

術後回収式 自己血輸血装置


ブラッドコンサベーション(減菌済/1患者限り)

CBC II

ConstaVac Blood Conservation System II

本製品は自己血回収器具による「術中術後自己血回収術」として
保険請求できます。

返血レバー 陰圧ダイヤル 陰圧インディケータ

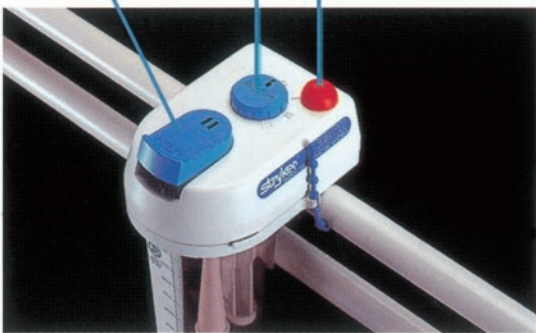

使用上の 注意

- 返血は、術後6時間以内に終了してください*
- 返血の際は、必ず40 μ mマイクロアグリゲートフィルタをご使用ください。
- 本製品は、いかなる場合でも再使用しないでください。
- 詳細は各病院所定の自己血輸血ガイドラインを参照してください。
- リンフュージョンバックに回収した血液は保存(液状・冷凍)して使用することはできません。

*Paula J. Santrach, MD, Chair et al: Standards for perioperative autologous blood collection and administration, 2nd edition. Advancing Transfusion and Cellular Therapies worldwide.

返血に適さない 症例

- 腎機能および肝機能不全
- 細菌感染症/敗血症
- 悪性腫瘍
- 血液凝固障害の疑いのある患者
- 局所用止血剤を使用した症例
- 過度の溶血
- 貧血傾向の疑いのある患者
- 頭部の症例
- その他医師が不適切と認めた症例

安全性

- 特殊弁の採用により回収血液の脂肪を除去します。
- 25, 50, 100mmHgで適切な陰圧を設定。(陰圧インジケータ付)
- 完全閉回路式。

コスト パフォーマンス

- バキュームポンプ内蔵式なので外部ポンプは必要ありません。
- 2バッグ方式…採血と輸血を並行して行えます。
- 800mlの大型リザーバーとリインフュージョンバッグ。

CBC II 自己血輸血装置


カタログ番号	品名	規格
SR-225-414 ¹⁾	CBC II ブラッド コンサベーション キット	(3.2mm ドレインチューブ付)
SR-225-426 ¹⁾		(4.8mm ドレインチューブ付)

<予備補充・アクセサリー>

SR-225-18-1 ²⁾	CBC用 ドレインチューブ	3.2mm、トロカール付
0225-028-864	I.V.ポール取付け金具	

● 取り付け用安全ストラップ


ベッドのサイドレールにクランプ部をはさんでストラップを巻きつけます。

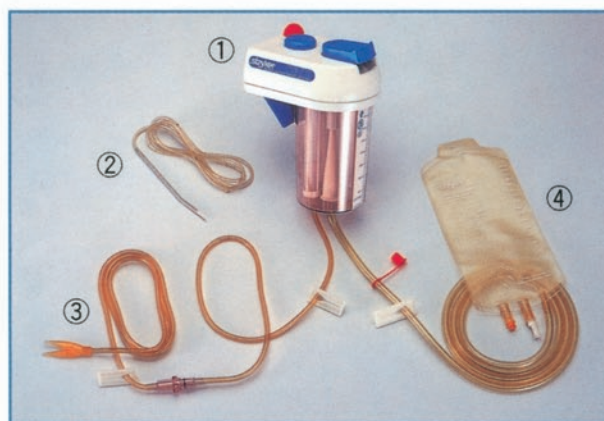

①800ml リザーバー ②ドレインチューブ ③Yコネクター ④800ml リインフュージョンバッグ

● I.V.ポール取付け金具

ベッドのサイドレールに装着が困難な場合など、I.V.ポール等に本金具を用いれば容易に装着できます。

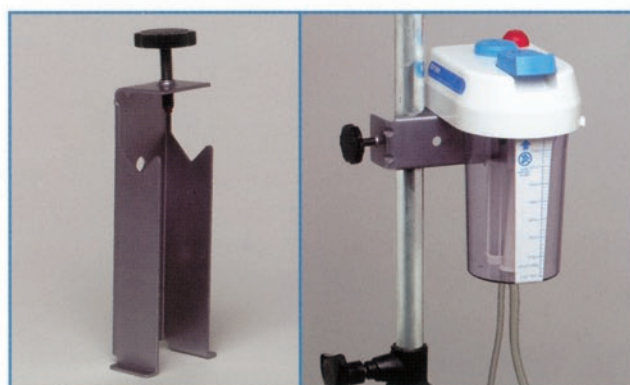

医療機器承認番号

¹⁾ 20600BZY01133000

²⁾ 20300BZY00810000

販売名

CBC-II ブラッドコンサベーションシステム

コンスタバック ブラッドコンサベーションキット

Joint Replacements

Trauma, Extremities & Deformities

Craniomaxillofacial

Spine

Biologics

Surgical Products

Neuro & ENT

Interventional Pain

Navigation

Endoscopy

Communications

Imaging

Patient Handling Equipment

EMS Equipment

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 tel: 03-6894-0000

www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site

www.stryker.co.jp/medical.html

この印刷物はストライカーの製品を掲載しています。全てのストライカー製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカー・グループの登録商標です。

Literature Number: IT1-63
YM/CO 2m 04/12

Copyright© 2012 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1